

TEST EN SALIVA ORALTOX

OralTox de Premier Biotech puede detectar hasta 5 drogas, Cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas es una prueba rápida de fluidos orales que brinda resultados rápidos y precisos en cualquier momento y en cualquier lugar. OralTox fue diseñado pensando en ser usado en laboratorios, centros medicos, uso policial y en lo laboral.

Nuestro objetivo es entregar un producto que proporcione resultados precisos, más rápidos, más claros y un procedimiento de prueba fácil de usar que se pueda administrar fácilmente. Único test de drogas de saliva certificado por la FDA en el mundo.




Contenedor	Inviolable
Detección	5 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / AMP / OPI / MET
Requisito Operación	Inmediato o Diferido
Almacenamiento	Período Prolongado
Sellado	Hermético

Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml
COCAINA	COC	20
MARIHUANA	THC	40
ANFETAMINAS	AMP	50
OPIÁCEOS	OPI	40
METANFETAMINAS	MET	50

RECOLECCIÓN DE MUESTRA

Haga que el donante barra o recorra el interior de la boca (mejillas, encías y lengua) y luego sostenga el hisopo en la boca hasta que aparezca el color en la ventana indicadora de la tira (rojo). Es importante no morder, chupar o masticar la esponja. Si después de 7 minutos el indicador de saturación no ha cambiado de color, deseche el dispositivo y repita la prueba.

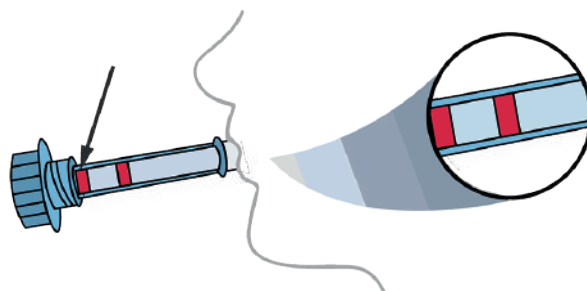

El donante puede quitar el hisopo de la boca cuando aparece el color en la ventana del indicador (rojo.)

TEST EN SALIVA ORALTOX

ACTIVACIÓN DE TEST

Con el dispositivo de prueba colocado en posición vertical sobre un **SUPERFICIE PLANA** (el dispositivo de prueba permanece en esta posición hasta que se interpreten los resultados), el donante se quita el hisopo de recolección de la boca y se lo entrega al administrador. El administrador inserta el hisopo de recolección en la esponja del dispositivo primero, empujando y girando hacia abajo hasta que el mango roscado se trabe en su lugar.



ACTIVACIÓN DE TEST

Los resultados negativos se pueden leer tan pronto como aparecen las líneas de prueba y control en cualquier tira reactiva (*a menudo dentro de 2 minutos*).

Los resultados *positivos presuntivos se deben leer a los 10 minutos*. Interprete la prueba como negativa, presunta positiva o inválida.

No lea los resultados de la prueba después de 20 minutos. Siga el protocolo establecido por su organización para obtener resultados positivos presuntos. Una vez que se hayan interpretado los resultados, el dispositivo OralTox se puede lanzar en un recipiente de basura normal.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Una banda aparece en la región de control (C) y otra banda aparece en la región de prueba (T). La intensidad de las líneas de prueba puede variar. Cualquier línea, independientemente de la intensidad, el color o el tamaño, es una línea e indica un resultado negativo para ese parámetro.

POSITIVO: Un resultado POSITIVO se indica cuando solo aparece una banda de color en la región de control (C), y no aparece ninguna banda de color aparente en la región de prueba (T).

INVÁLIDO: La banda de control no aparece. Los resultados de cualquier prueba que no haya producido una banda de control en el tiempo de lectura especificado deben desecharse. Revise el procedimiento y repita con una nueva prueba.



INTERPRETACIÓN GRÁFICA

NEGATIVO	
POSITIVO	
INVÁLIDO	

