


TEST DE COPA 5 DROGAS EN ORINA

La copa de prueba multi-droga proporciona resultados precisos y rápidos en solo 5 minutos, utilizando una mezcla de anticuerpos para identificar selectivamente las drogas y sus metabolitos en muestras de prueba con alta sensibilidad. Es una alternativa inteligente a los laboratorios que requieren de 24 a 48 horas para dar resultados, y ofrece una precisión que varía entre 95 a 99% dependiendo del medicamento individual. Es un método popular para la detección inmediata de drogas de abuso.

Contenedor	INVOLABLE
Detección	5 parámetros
Tipos de Drogas	COC / THC / BZO / AMP / OPI
Requisito Operación	Inmediato
Almacenamiento	Período Prolongado
Control Temperatura	Si
Sellado	Hermético
Control de adulterante	Si

Nombre Droga	Sigla	Nivel Corte ng/ml	Tiempo de detección	
			Mínimo	Máximo
COCAINA	COC	150	24 Horas	48 Horas
MARIHUANA	THC	50	2 Horas	10 Días
ANFETAMINAS	AMP	500	4 Horas	24 Horas
BENZODIAZEPINAS	BZO	200	3 Días	7 Días
OPIÁCEOS	OPI	2.000	2 Horas	3 Días

CONTROL DE ADULTERANTE

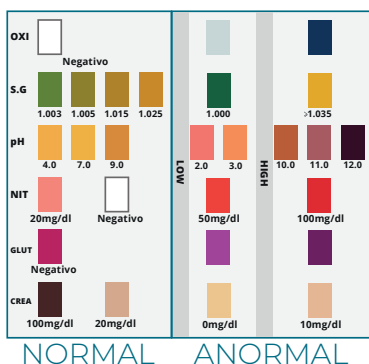

La adulteración es la manipulación de una muestra de orina con la intención de alterar los resultados. El uso de adulterantes o dilución de la muestra puede causar resultados falsos negativos en las pruebas de drogas. Para detectar la adulteración se emplean los controles de adulterantes que determinan características de la orina como pH, la gravedad específica y la creatinina y para detectar la presencia de oxidantes / PCC, nitritos o glutaraldehído en la orina.



Uso laboral
CONTROL DE ADULTERANTE



TEST DE COPA 5 DROGAS EN ORINA

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen líneas de color en la región de Control (C) y en la región del test (T). Este resultado negativo indica que la concentración de la droga particular analizada en la muestra de orina está por debajo del valor del cut-off para la droga de que se trate.



NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

POSITIVO: Sólo aparece una línea de color en la región de Control (C) y NO aparece línea de color en la región del test (T). El resultado positivo indica que la concentración de la droga en la muestra de orina es superior al valor del cut-off específico de esa droga.



INVÁLIDO: No aparece línea de color en la región de Control (C). Las razones más comunes para la ausencia de la línea de color en la región de Control son insuficiente volumen de muestra o un procedimiento aplicado incorrectamente. Leer las instrucciones de nuevo y repetir la prueba empleando un nuevo test. Si el resultado continua siendo inválido, contactar con el fabricante.



USO

Permita que el dispositivo de prueba, la muestra y/o los controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C).



Detección de drogas de un máximo hasta 7 días.

