

TEST ANTÍGENO

NASAL COVID 19

RESUMEN


- Saque el casete de prueba del envase de aluminio sellado y utilícelo antes de que transcurra una hora. Se obtendrán los resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir el envase de aluminio.
- Invierta el tubo de extracción de muestra y añada 3 gotas de la muestra extraída al pocillo de la muestra (S). No mueva el casete de prueba durante el desarrollo de prueba.
- Lea el resultado a los 15 minutos. No lea el resultado después de 20 minutos.



Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control (C) y otra en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.

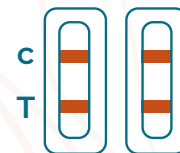

POSITIVO

Negativo:

Si una banda de color aparece en la zona de Control (C) y ninguna banda de color aparece en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



NEGATIVO

Inválido:

Si no aparece ningún línea de color en la zona de control (C) a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.



INVÁLIDO:

CERTIFICACIONES