

TEST RAPIDO

ANTIGENO NASAL ALLTEST




RESUMEN

- Alltest prueba rápida de antígeno COVID 19, detecta la proteína **Nucleocapsida (N)** y el fragmento de Proteína **Spike (S)** del SARS Cov 2, lo que hace que la prueba **sea altamente específica y sensible** en el diagnóstico de **COVID 19**.

Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control (C) y otra en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.

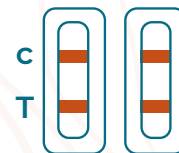

POSITIVO

Negativo:

Si una banda de color aparece en la zona de Control (C) y ninguna banda de color aparece en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



NEGATIVO

Inválido:

Si no aparece ninguna línea de color en la zona de control (C) a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.



INVÁLIDO:

CERTIFICACIONES

