

AUTOTEST NASAL COVID 19 BOSON




CARACTERÍSTICAS

- Prueba casera rápida de antígenos para la detección del virus Covid-19 mediante un hisopo en la región nasal anterior durante los 7 primeros días a la aparición de síntomas.
- El diseño y la información facilitada para su uso son aptos para que pueda ser realizada por usuarios no profesionales.
- Se podrá usar en el entorno doméstico, laboral, escolar o social, contribuyendo así a frenar la pandemia en nuestro país.

Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control (C) y otra en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.

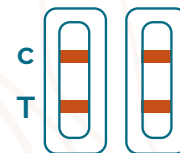

POSITIVO

Negativo:


Si una banda de color aparece en la zona de Control (C) y ninguna banda de color aparece en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



NEGATIVO

Inválido:

Si no aparece ninguna línea de color en la zona de control (C) a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.

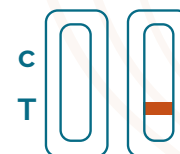

INVÁLIDO:

CERTIFICACIONES

