

TEST RAPIDO

NASOFARÍNGEO ALLTEST




RESUMEN

Test Antígeno Covid-19 Nasofaríngeo Alltest proporciona **resultados rápidos** para una **rápida toma de decisiones** en el punto de atención. El muestreo nasal es menos invasivo, lo que puede **reducir la incomodidad del paciente** y **minimizar la duración** del procedimiento, así como el riesgo de **estornudar o toser**. Las muestras de **hisopos nasales** pueden ser recolectadas por los **propios pacientes bajo supervisión**.

Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control (C) y otra en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.

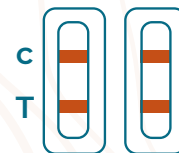

POSITIVO

Negativo:

Si una banda de color aparece en la zona de Control (C) y ninguna banda de color aparece en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



NEGATIVO

Inválido:

Si no aparece ninguna línea de color en la zona de control (C) a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.



INVÁLIDO:

CERTIFICACIONES

