


## TEST COVID 19 NASOFARÍNGEO ROCHE

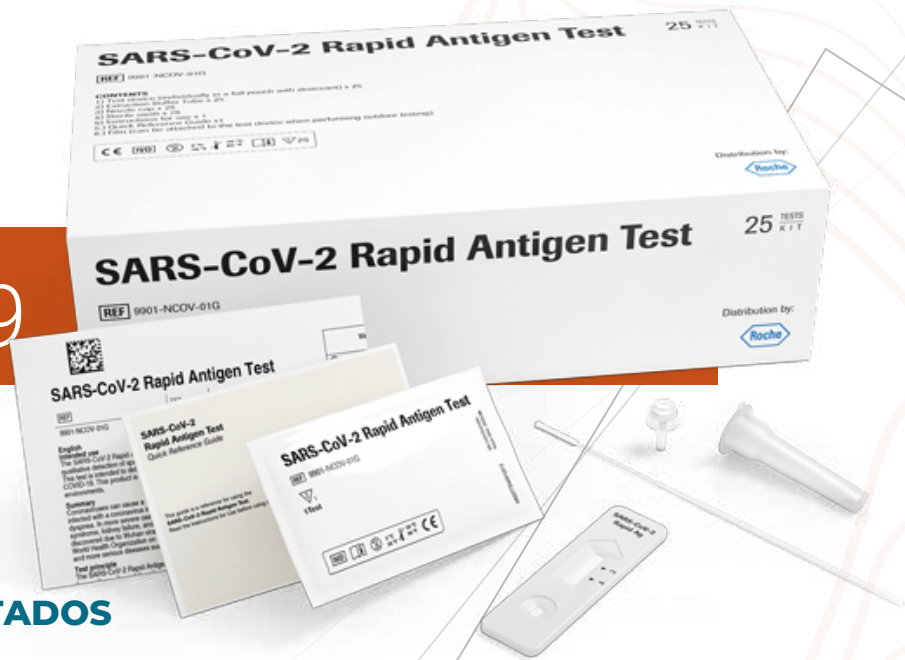

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En la parte superior de la ventana de resultados **aparece una línea de color para indicar** que la prueba ha **funcionado correctamente**. Es la **línea de control (C)**. Incluso si **la línea de control es débil**, se considera que **la prueba se ha realizado correctamente**. Si **no hay línea de control visible**, la prueba **no se considera válida**.

En la caso de **un resultado positivo**, aparece una **línea de color en la sección inferior** de la ventanada de resultados. Es la **línea de prueba (T)**. Incluso si **la línea de prueba es muy débil o no es uniforme**, el resultado de **la prueba debe interpretarse como un resultado positivo**.

#### Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control **(C)** y otra en la zona de Test **(T)** a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

**Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.**



#### Negativo:

Si una banda de color aparece en la zona de Control **(C)** y ninguna banda de color aparece en la zona de Test **(T)** a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



#### Inválido:

Si no aparece ninguna línea de color en la zona de control **(C)** a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.



### CERTIFICACIONES

